

## ➤ Die Bedienungselemente



# TELEARZT

- 1 Display
- 2 M1 Taste
- 3 Start/Stopp-Taste
- 4 M2 Taste

## ➤ So stellen Sie die Uhrzeit um:

# TELEARZT

Halten Sie die **START/STOPP-Taste** ① für 5 Sekunden gedrückt.

### Stundenformat

Im Display blinkt das Stundenformat.


- Wählen Sie mit den Speichertasten **M1/M2** Ihr gewünschtes Stundenformat und bestätigen Sie mit der **START/STOPP-Taste** ①.



### Datum


Im Display blinkt die Jahreszahl.

- Wählen Sie mit den Speichertasten **M1/M2** die Jahreszahl und bestätigen Sie mit der **START/STOPP-Taste** ①.

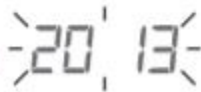

Im Display blinkt die Monatsanzeige.

- Wählen Sie mit den Speichertasten **M1/M2** den Monat und bestätigen Sie mit der **START/STOPP-Taste** ①.

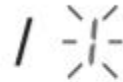

Im Display blinkt die Tagesanzeige.

- Wählen Sie mit den Speichertasten **M1/M2** den aktuellen Tag und bestätigen Sie mit der **START/STOPP-Taste** ①.



### Uhrzeit

Im Display blinkt die Stundenzahl.

- Wählen Sie mit den Speichertasten **M1/M2** die aktuelle Stundenzahl und bestätigen Sie mit der **START/STOPP-Taste** ①.



Im Display blinkt die Minutenzahl.

- Wählen Sie mit den Speichertasten **M1/M2** die aktuelle Minutenzahl und bestätigen Sie mit der **START/STOPP-Taste** ①.



### Bluetooth®

Im Display blinkt das *Bluetooth*® Symbol.

- Wählen Sie mit den Speichertasten **M1/M2**, ob die automatische *Bluetooth*® Datenübertragung aktiviert (*Bluetooth*® Symbol blinkt) oder deaktiviert (*Bluetooth*® Symbol wird nicht angezeigt) sein soll und bestätigen Sie mit der **START/STOPP-Taste** ①.

① Die Akkulaufzeit verkürzt sich durch die Übertragung per *Bluetooth*®.

① Behalten Sie bitte die automatische *Bluetooth*® Datenübertragung bei, um die Funktionsfähigkeit des TELEARZTES zu gewährleisten.