


➤ Die Bedienelemente

TELEARZT


Vorderseite

- 1 Display
- 2 Aufnahme für Teststreifen

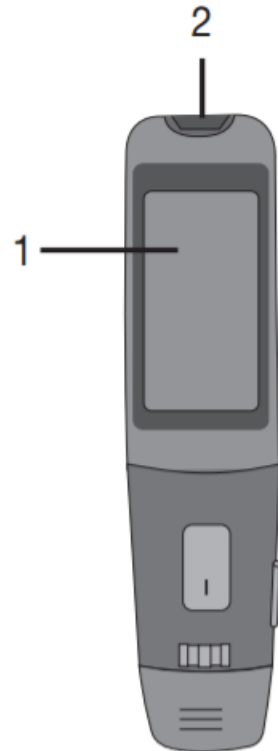

Seite

- 1 Bedienrad
- 2 EIN/AUS-Schalter
- 3 Schieber zum Spannen

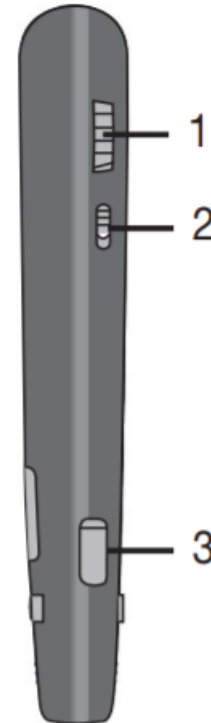


➤ So stellen Sie die Uhrzeit um:

Sie müssen Datum/Uhrzeit unbedingt einstellen. Nur so können Sie Ihre Messwerte korrekt mit Datum und Uhrzeit speichern und später abrufen.


Die Uhrzeit kann im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden.

1. Schalten Sie das Blutzucker-Messgerät ein, indem Sie das Bedienrad kurz gedrückt halten.


2. Drehen Sie das Bedienrad bis der Pfeil auf "Einstellungen" zeigt und drücken Sie das Bedienrad

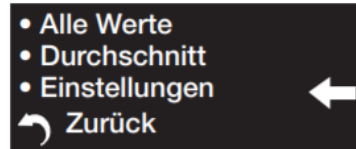

3. Drehen Sie das Bedienrad bis der Pfeil auf "Datum/Uhrzeit" zeigt und drücken Sie das Bedienrad.

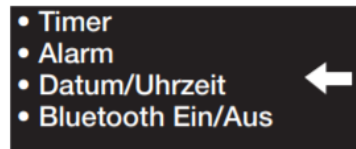


4. Stellen Sie durch Drehen des Bedienrads das Jahr ein und drücken Sie das Bedienrad

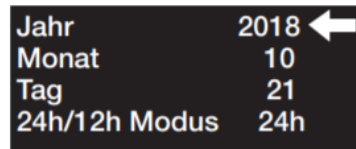

5. Stellen Sie Monat, Tag, 24h/12h Modus, Stunde und Minute ebenso ein.

6. Um die Einstellungen zu speichern, drehen Sie das Bedienrad bis der Pfeil auf "Speichern" zeigt und bestätigen Sie durch Drücken des Bedienrads.

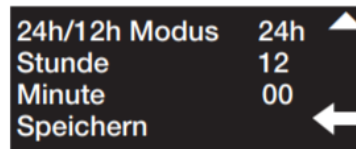

TELEARZT



Behalten Sie bitte die automatische Bluetooth Datenübertragung bei, um die Funktionsfähigkeit des TELEARZTes zu gewährleisten.